

Labor Dr. Edith Beck

4020 Linz, Hopfengasse 3

Anleitung zur richtigen Probenentnahme für Chlamydia trachomatis & N. gonorrhoeae

FRAU:

- Schleimreste vom Muttermund mit weißem Reinigungstupfer entfernen -> Tupfer werfen
- blauen Abstrichtupfer im endozervikalen Kanal 10-30 Sekunden vorsichtig drehen
- Abstrichtupfer in das beschriftete Transportmedium geben
- an der Einkerbung abbrechen




MANN:

- mind. 1 Stunde vorher nicht urinieren!
- blauen Abstrichtupfer 2-4 cm weit in Harnröhre einführen
- 2-3 Sekunden vorsichtig drehen
- Abstrichtupfer in das beschriftete Transportmedium geben
- an der Einkerbung abbrechen



Probenlagerung:

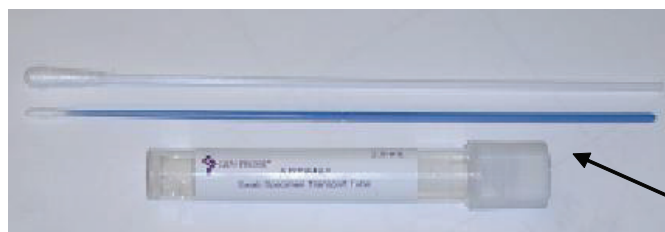

2 - 30°C
bis zu 60 Tagen haltbar

BITTE BEACHTEN: silberne Oberseite des Deckels nicht berühren – Kontaminationsgefahr!